


# Filtek™ Z250

Univerzálny výplňový materiál

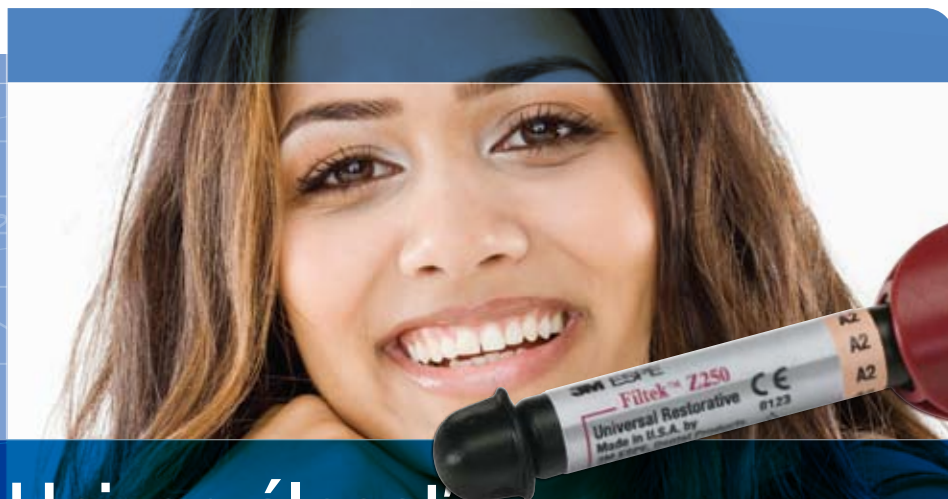

## Univerzálnosť. 10 rokov osvedčenej kvality.

- **Dlhoročné skúsenosti** dosiahnuté rokmi klinickej praxe
- **Vynikajúce modelačné vlastnosti**, bez rizika poklesu či prepadu výplne, bez lepivosti na nástroje
- **Výnimočná viacúčelovosť**, je ideálny pre výplne vo frontálnom aj distálnom úseku
- **Rýchlosť a pohodlnosť**, jednoduchá aplikácia, polymerizácia jednej vrstvy 20 sekúnd
- **Prirodzený vzhľad**, široká škála odtieňov dokonale sa prispôsobujúca farbe zuba
- **Rádioopacita**



**Filtek™ Z250 univerzálny výplňový materiál v „striebornej edícii“ je výsledkom dlhoročných klinických úspechov.**


Od momentu uvedenia na trh mu stomatológovia z celého sveta prejavujú dôveru s cieľom zhotovovania pevných, dlhotrvajúcich a estetických výplní. **Celosvetový počet výplní zhotovených materiálom Filtek™ Z250 presahuje ročne 35 miliónov.** Táto osvedčená dlhoročná skúsenosť je odzrkadlená v špeciálnom balení v „striebornej edícii“.

**Vďaka využitiu hybridnej technológie vyhovuje materiál širokej škále potrieb s dokonalými výsledkami.**

Univerzálnosť použitia materiálu Filtek Z250 vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu je jedným z dôvodov, prečo s ním stomatológovia radi pracujú. Avšak hlavným dôvodom je dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vďaka výbornej pevnosti materiálu.

• **Estetický výsledok** je dosiahnutý vďaka širokej škále odtieňov, jednoduchému a rýchlemu lešteniu.

- **Mimoriadna marginálna adaptácia** umožňuje jednoduchú modeláciu.
- **Overené fyzikálne vlastnosti** ako znížená objemová kontrakcia pre zníženie rizika pooperačnej citlivosti, trvácnosť a vysoká odolnosť voči fraktúram.

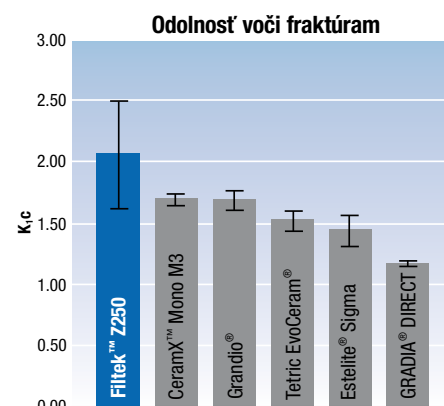


Prvá priečka v testovaní dokazuje, že výplňový materiál Filtek Z250 má najvyššiu odolnosť voči fraktúram v porovnaní s ostatnými testovanými kompozitnými materiálmi.

Zdroj: 3M ESPE interné dáta

## Univerzálny výplňový materiál Filtek™ Z250 obdržal 5 plusov +++++ v hodnotení časopisu The Dental Advisor.

The Dental Advisor, vysoko rešpektovaná publikácia zaoberajúca sa zlepšením starostlivosti o pacienta prostredníctvom vzdelávania a výskumu, zhodnotila viac ako 560 výplní počas 9 rokov. Štúdia dokázala, že Filtek Z250 ponúka mimoriadnu odolnosť voči opotrebovaniu a vysokú pevnosť. Zároveň výplne zotrvali hladké, farebne stabilné a v hodnotení estetiky získali stupeň veľmi dobrý až vynikajúci. Táto štúdia potvrdila, že výplňový materiál Filtek Z250 je vyhovujúci tak pre výplne vo frontálnom, tak aj v distálnom úseku chrupu.

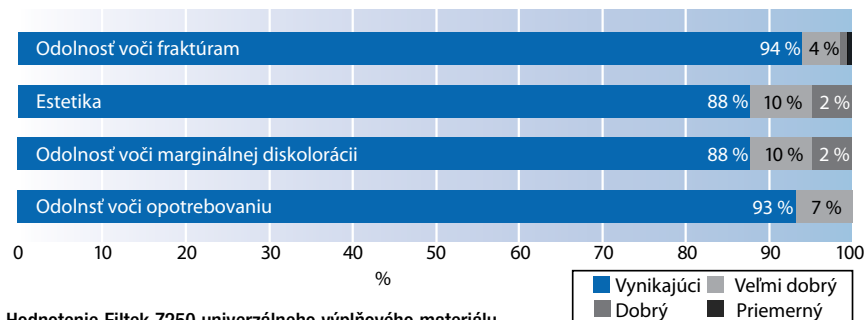

Hodnotenie Filtek Z250 univerzálného výplňového materiálu počas 9 rokov

Zdroj: The Dental Advisor, jún 2008

## Indikácie:

- priame výplne vo frontálnom a distálnom úseku
- koreňové nadstavby
- dlahovanie
- nepriame výplne vrátane inlejí, onlejí a faziet

## Objednávacie informácie



### Číslo produktu Informácie o produkte

6020E Univerzálny výplňový materiál Filtek™ Z250  
 Úvodné balenie:  
 8 striekačiek - 4 g (1 ks z každého odtieňa A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3 a UD), 1 ampulka Adper Singel Bond - 6 ml, 1 striekačka leptací gél - 3 ml, skúšobné balenie Sof-Lex leštiace disky, koncovky na gél Etchant, rúčky na štetce, aplikačné štetôčky, jendorázové miešacie podložky, farebný kľúč, technický popis a návod

### Náhradné balenie

#### Číslo produktu Odtieň

6020A1	A1
6020A2	A2
6020A3	A3
6020A3.5	A3.5
6020A4	A4

### Číslo produktu Informácie o produkte

#### Náhradné balenie Odtieň

6020B0.5	B0.5
6020B1	B1
6020B2	B2
6020B3	B3
6020C2	C2
6020C3	C3
6020C4	C4
6020D3	D3
6020I	Incizálny
6020UD	Dentínový

Náplne sú dodávané v striekačkách - 4 g.

**3M ESPE**

### 3M (East) AG

Vajnorská 142, 831 04 Bratislava  
 Tel.: 02/ 49 105 211  
 Fax: 02/ 44 454 476  
 innovation.sk@m3m.com  
 www.3mespe.com

3M, ESPE, Adper, Filtek, Scotchbond a Sof-Lex sú obchodné značky 3M alebo 3M ESPE AG. Charisma, Herculite XRV, Prodigy, TPH a Tetric Ceram nie sú obchodné značky 3M.